

## INSTRUKCJA PRZEŁĄCZANIA TANITY BC-418 MIĘDZY OPCJAMI ZAPISU DANYCH

### **Z opcji elektronicznej na wydruk (gdy na ekranie widnieje symbol r5)**

- włączamy Tanitę przytrzymując jednocześnie przyciski **ON/OFF** oraz **CE** (oba pomarańczowe); po trzecim sygnale dźwiękowym pojawi się na ekranie litera F oraz migające 00,
- za pomocą klawiszy wpisujemy **08** (pojawi się napis on r5),
- wciskamy klawisz **0**,
- zatwierdzamy przyciskiem **CE** (pojawi się litera F oraz migające 00),
- wyłączamy Tanitę przyciskiem **ON/OFF**,
- uruchamiamy ponownie przyciskiem **ON/OFF**,
- na ekranie widać migające PŁ oraz 00 – Tanita jest gotowa do pracy.



### **Z opcji wydruku na elektroniczną (gdy na ekranie widać 00 oraz miga symbol PŁ)**

- włączamy Tanitę przytrzymując jednocześnie przyciski **ON/OFF** oraz **CE** (oba pomarańczowe), po trzecim sygnale dźwiękowym pojawi się na ekranie litera F oraz migające 00,
- za pomocą przycisków wpisujemy **08** (pojawi się napis OFF i r5),
- wciskamy przycisk **1**,
- zatwierdzamy przyciskiem **CE** (pojawi się litera F oraz migające 00),
- wyłączamy Tanitę przyciskiem **ON/OFF**,
- uruchamiamy ponownie przyciskiem **ON/OFF**,
- na ekranie widać symbol r5 – Tanita jest gotowa do pracy.

**Uwaga!**

**Procedurę zawsze rozpoczynamy przy wyłączonym urządzeniu.**